



## Fremgangsmåte for tilpassing hos Tannlegen



### Panthera X3 Snorkeskinnen

1. Start med å varme opp skinnene i varmt vann, ca. 40 grader

2. Prøv først skinnen til en kjeve, deretter den andre skinnen.

Viktig at det prøves hver for seg første gang

Se at skinnen ikke presser på tannkjøttet

3. Prøv begge skinnene i lag, og la pasienten samtidig bite lett sammen uten sterkt trykk

for å finne ut om skinnen er parallelt på hverandre,

4. Ta ut, og sett sammen skinnene, sett på **Kjeveortopedisk gummibånd** og la pasient prøve igjen.



Med denne innstillingen må pasienten venne seg til skinnen i **1-2 uker**.

## Justering med snap-in klips sett





Deretter justeres skinnen med å bytte klips for å oppnå den optimale terapiposisjonen i retning +.(f.eks. fra 0,5mm til 1,0 mm).

Justeringer gjentas ca. **3 ganger**, som betyr at pasient med skinnen kommer tilbake å får dette gjort, inntil det maksimale frem skyvning av underkjeve er funnet, uten at pasient har varige smerter i kjeveleddet.

Vi anbefaler en sjekk av **Panthera X3 Snorkeskinnen** etter 6mnd.

En snorkeskinne varer normalt i 3 år før den blir ødelagt eller utslitt.  
OBS!! Vennligst gjør pasient oppmerksom på renhold av skinnen.

**Snap-in klips sett** skal **ikke** leveres til pasient, men, beholdes i pasient journal

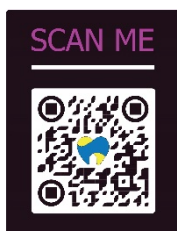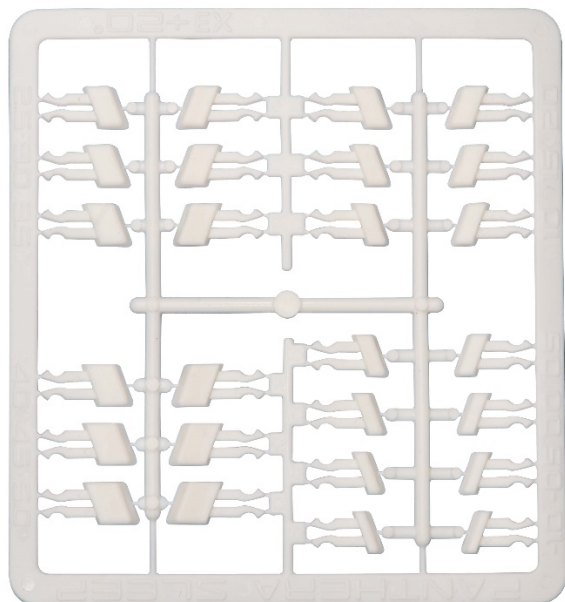

leveres av : Fauske Tannteknikk AS 8209 Fauske

[fausketannteknikk@bestdental.no](mailto:fausketannteknikk@bestdental.no)

☎. 75 64 65 66