

Les bruksanvisningen før du bruker Panthera D-SAD X3.

INTRODUCING THE **PANTHERA** X3



Komponenter

Topp- og bunnskinner.

Et snap-in klips sett for fremføring av kjeven. (om mulig kun brukt av tannlegen)

Kjeveortopedisk gummibånd.



Introduksjon

D-SAD X3 er et produkt utviklet for å behandle snorking og mild til moderat obstruktiv søvnapné (OSA) hos voksne. Bruken av produktet bør kontrolleres av en tannlege eller en øre-, nese- og halsspesialist. Panthera D-SAD-produkter er produsert etter dine nøyaktige mål og er beregnet for individuell bruk av pasienter.

Hvordan fungerer disse produktene?

Når det bæres mens du sover, plasseres produktet på tennene for å bevege underkjeven fremover. Fremføring av kjeven beveger også tungene fremover for å holde de øvre luftveiene åpne. Åpning av luftveiene letter luftstrømmen og reduserer snorking og OSA.

Indikasjon

Panthera D-SAD-produkter er utviklet for å redusere snorking og lindre mild til moderat obstruktiv søvnapné (OSA) hos voksne.

Viktig å vite

Bær alltid topp- og bunnskinnene sammen. Før hver bruk, sjekk skinnen for: Mulig skade: Inspiser din D-SAD for tegn på skader, som brudd og sprekker. Hvis enheten er skadet eller ødelagt, må den IKKE brukes for å unngå skader som: B. for å unngå kvelning eller kuttskade. Slutt å bruke og kontakt tannlegen eller lege umiddelbart.

(Dette trinnet utføres kun av tannlegen!)

Under fremdriftsfasen kan tannlegen bytte klips for å oppnå den optimale terapiposisjonen til D-SAD X3. Tannlegen vil informere deg om dette er nødvendig. For å øke fremspringet, bruk lengre klips (f.eks. fra 0 til 0,5 mm). For å redusere fremspring, bruk kortere klips (f.eks. fra 1 til 0,5 mm). Når den endelige innstillingen er oppnådd, er klippene fikset og trenger ikke lenger å endres. Bruk alltid samme lengde på klipsene på begge sider med mindre annet er instruert av tannlegen.



Forbereder seg på søvn

Børst tennene dine, bruk tanntråd og fukt produktet med lunkent vann.

Når du plasserer produktet i munnen, plasserer du først **TOPPSKINNEN** på de øvre tennene ved å trykke på begge sider med tomlene.

Flytt kjeven fremover og skyv **bunnskin**nen på de nedre tennene.

Trykk med fingrene på begge sider.

Lukk sakte munnen med kjeven i den Konfigurasjon i forovervendt posisjon.

Ta ut X3

Slik fjerner du bunnskinnen: Plasser tomlene på begge sidene av den nedre skinnen, nær fronten av tannkjøttet i nivå med de nedre hjørnetennene, og løft begge sider av produktet samtidig.

Slik fjerner du toppskinnen: Plasser fingrene på begge sidene av toppskinnen, nær tannkjøttet, og trekk ned på begge sider av skinnen samtidig. Fjern produktet fra munnen og rengjør det i henhold til Rengjøringsinstruksjoner.

Instruksjoner for rengjøring og oppbevaring

Skyll produktet med lunkent vann hver morgen etter bruk. Rengjør den med en myk tannbørste eller protesebørste. Børst alle overflater og sider. Sjekk produktet for renslighet og skade.

Tørk produktet grundig med et rent papir- eller tøyhåndkle.

Oppbevar produktet i oppbevaringsbeholderen med lokket åpent ved romtemperatur, vekk fra direkte varme, fuktighet og lys.

Oppbevar aldri produktet i en lukket beholder under fuktige forhold.

Ikke plasser produktet i kokende vann (100°C).

Merk:

Misfarging av produktet kan være normalt; dette er på grunn av surheten i spytt. Noen medisiner, amalgamfyll, kaffe, te, cola eller vin kan påvirke fargen på produktet. Dette påvirker ikke ytelsen eller garantien til produktet.

Materialeegenskaper:

D-SAD X3 er laget av 100 % polyamid type 12, et medisinsk materiale fra nylonfamilien. Allergier og intoleranser mot dette biokompatible materialet er ekstremt sjeldne. Hvis du tror du har en allergisk reaksjon, slutt å bruke enheten og kontakt tannlegen eller legen din.

Garanti

Panthera Sleep-produkter er garantert i 3 år fra produksjonsdatoen. Garantien dekker produktene mot feil i utførelse og materialer. Dette er en produsentgaranti og reparasjoner bør kun utføres av Panthera Dental eller deres autoriserte partnere/distributører. Denne garantien dekker ikke kostnader forbundet med ytterligere tannlege- eller legebesøk.

Klinikk:

Tannlegen:

☎ tel.: